

細くしなやかなスーパーテーパード毛の 歯周ケア用歯ブラシ

Systema



42M/レギュラーサイズのヘッド



42H/レギュラーサイズのヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



44M/口腔内で動かしやすい小型ヘッド




44H/小型ヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **330円**


狭い隙間に毛先が無理なく届いてプラークコントロール

1 歯肉へのストレスを最小限に抑え、やさしい磨き心地。

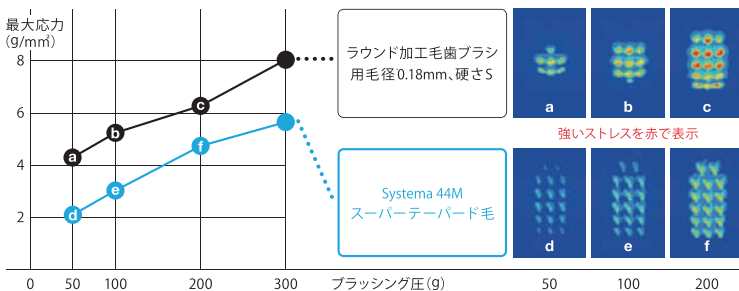

2 歯周ポケット、歯間部など、狭い隙間に容易に到達するスーパーテーパード毛がプラークをしっかりと除去。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

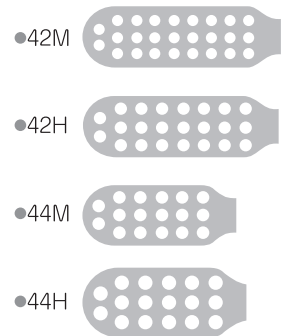

ハンドルカラー (各5色)



口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く
一歩進んだ歯周ケアのための歯ブラシ

Systema AX



44M / 口腔内で動かしやすい超薄型コンパクトヘッド



44H / 超薄型コンパクトヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



45M / さらに口腔内で動かしやすい超薄型超コンパクトヘッド



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円


歯間、歯頸部から最後臼歯部まで、口腔内すみずみをしっかりケアできます

- ① 厚さ2.6mm超薄型コンパクトヘッド。
口腔内での動かしやすさを追求した設計です。




- ② 歯肉へのストレスを抑えた
スーパーテーパード毛で歯肉
にやさしい磨き心地です。
歯頸部・歯間部など、狭い
隙間にも毛先がよく届きます。

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス
有限要素法解析

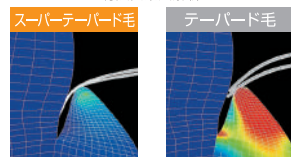

強いストレスを赤で表示
ライオン(株)データ

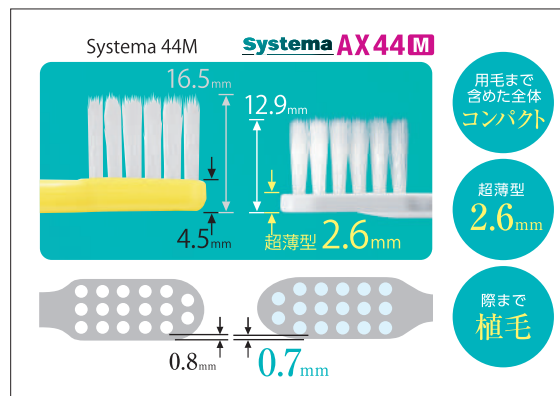

- ③ どんな部位にもまんべんなく届き、自然と毛先がコントロールしやすいロング&スリムネックのストレートハンドル。

- ④ どんな握り方にも対応できるソフトラバー付き曲面グリップ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ハンドルカラー (各4色)



歯肉へのやさしさと確かな刷掃力を両立した 歯周ケア歯ブラシ


Systema SP-T 歯ブラシ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **430円**

炎症が起こりがちな歯周病ハイリスク部位をやさしくケア

- ① 細くしなやかなスーパーテーパード毛を密に植毛。先端部 0.01mm。歯周ポケットや歯間部など狭いすき間に届き、優れた刷掃力を発揮します。

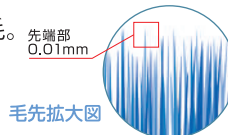

SP-T 歯ブラシ(スーパーテーパード毛)の設計




[Systema SP-T 歯ブラシ]の植毛本数は [Systema 44M]の**約2倍**

歯肉へのやさしさと
確かな刷掃力を両立


- ② 歯肉へのストレスを抑え、歯肉にやさしい磨き心地です。

有限要素法による歯肉へのストレス解析

解析条件
〈曲面歯肉モデル〉
〈刷掃距離〉10mm
〈ブラッシング力〉200g

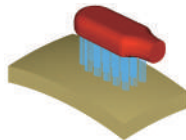

ラウンド加工毛 Sタイプ歯ブラシ (DENT.EX Slimhead II 33S)

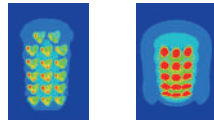

強いストレスほど赤に近く表示

- ③ 全体がコンパクトで口腔内で動かしやすいヘッド部と、コントロール性に優れたストレートハンドルです。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ヘッド側面写真(実物大)




ハンドルカラー (2色)



効率よくブラッシングできる 幅広ヘッド歯ブラシ

DENT.**EX** systema genki genki f genki j

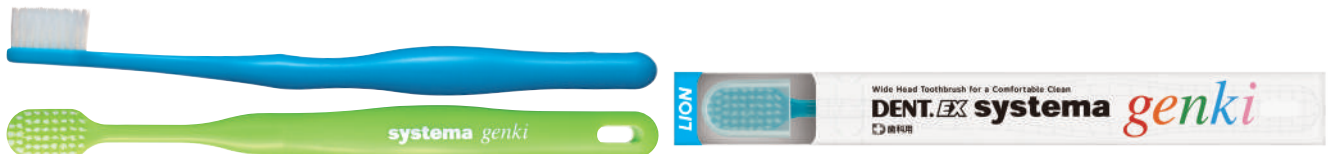

genki
コンパクトヘッド歯ブラシでは上手く磨けない方に。



genki f
genkiのヘッドでは大きいと感じる方に。



genki j
ブラッシングが苦手な若年者に。


メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

口腔サイズに合わせて使いやすい3つのgenkiをラインアップ

- 1 接触面積が広い幅広ヘッド。
歯面・歯頸部から歯肉まで効率よく磨けます。



- 2 歯周ポケットに届きやすいスーパーテーパード毛。
細くしなやかで、歯肉へのストレスを抑えます。

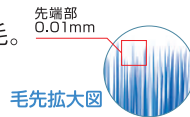

- 3 握りやすい滑らかな曲面のためのグリップ。
どんな握り方でも使いやすい。

genkiシリーズはこんな患者様にお薦めください。

genki

- コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない方
- 矯正装置をつけている方
- 欠損歯がある方
- 歯周病を主訴される方
(歯肉の発赤・腫脹、出血、歯の動揺、口臭など)
- 象牙質知覚過敏の方
- 舌苔がある方


genki f

- 口腔サイズの小さな方
- 女性の方
- genkiのヘッドでは大きいと感じる方

genki j

- 上手にブラッシングできないため、
歯肉炎リスクが高まる 9~15歳くらいの若年者

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

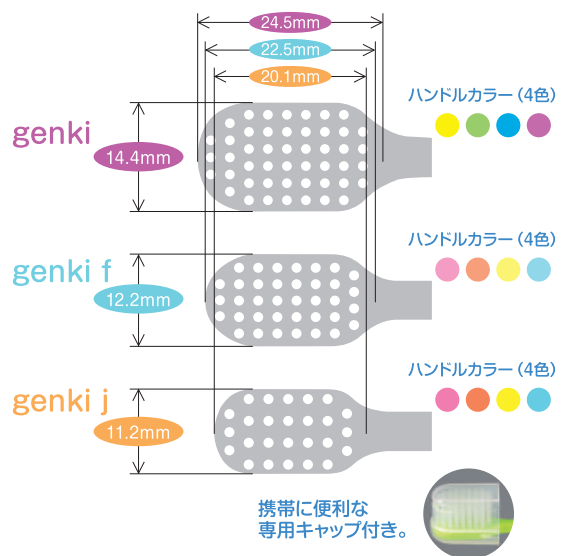

磨きにくい所にしっかり届く
優れたプラーク除去効果を発揮

Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ



STANDARDタイプ S



STANDARDタイプ M




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **320円**

「フラットダブル植毛」でプラークにダブルアプローチ

1 フラットダブル植毛の高い清掃力。


毛先面がフラットで当てやすく、ダブル植毛が歯間部・咬合面どちらのプラークも除去。

●歯間部のモデル清掃力

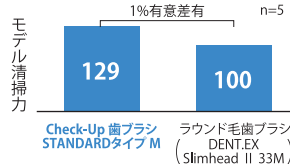


歯間部の清掃力がラウンド毛歯ブラシより有意に優れることを確認

●咬合面のモデル清掃力

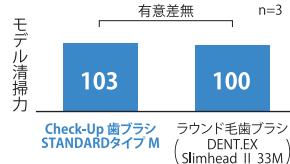

咬合面の清掃力はラウンド毛歯ブラシと同等であることを確認

※顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷牙後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:200g 刷牙回数:10回 DENTEX Slimhead II 33Mを100とした場合の指数。

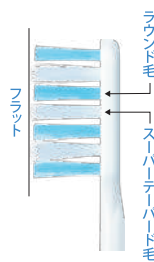

2 3.0mm薄型ヘッド&スリムネックで臼歯部にもムリなく届く。

3 持ちやすくすべりにくいラバーハンドル。

ヘッドの大きさ植毛配列(実物大)

●STANDARDタイプ S



●STANDARDタイプ M



ハンドルカラー(各3色)



幅広ヘッドで効率よく磨ける
優れたプラーク除去効果を発揮

Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ



WIDEタイプ S



WIDEタイプ M



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 360円

「幅広ヘッド」でどの部位にも当てやすい

1 フラットダブル植毛の高い清掃力。
毛先面がフラットで当てやすく、ダブル植毛が歯間部・咬合面どちらのプラークも除去。

●歯間部のモデル清掃力

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| モデル清掃力 | 204 | 100 |
| Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ S | | スーパーテーパーヘッド毛歯ブラシ (DENT.EX systema genki f) |

1%有意差有 n=5

●咬合面のモデル清掃力

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| モデル清掃力 | 215 | 100 |
| Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ S | | スーパーテーパーヘッド毛歯ブラシ (DENT.EX systema genki f) |

1%有意差有 n=3


歯間部の清掃力がスーパーテーパーヘッド毛歯ブラシより有意に優れることを確認

咬合面の清掃力がスーパーテーパーヘッド毛歯ブラシより有意に優れることを確認

※頭模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:200g 刷掃回数:10回 DENT.EX systema genki fを100とした場合の指数。

- 2 幅広ヘッドで歯面から歯頸部・歯肉まで、効率よくブラッシング可能。
- 3 3.0mm薄型ヘッド&スリムネックの高い到達性。
- 4 持ちやすくすべりにくいラバーハンドル。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

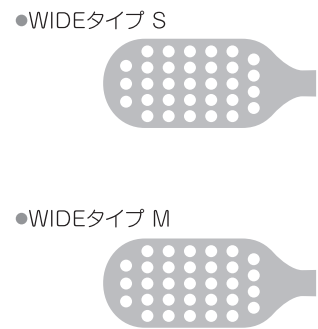

ハンドルカラー(各3色)



資料提供 北海道札幌市北24条かやの歯科クリニック 荻野美帆 歯科衛生士

操作性を追求した 歯科用歯ブラシのスタンダード


DENT. EX Slimhead II



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **320円**

患者様ごとのブラッシング指導に合わせて選べる6タイプ

- 1 白歯部にラクに届き、清掃しやすいヘッド+ネックが60mmのロングネック。歯頸部に当てやすい先端厚3.9mmのスリムヘッド。持ちやすいラウンドハンドル。

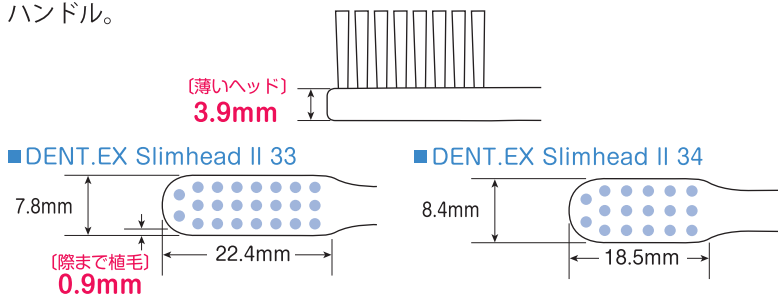

- 2 歯間部に毛先が入りやすく、コントロールしやすい植毛仕様。
- 3 ヘッドサイズ(33、34)、毛の硬さ(S、M、H)で選べる6タイプ。

ヘッドの大きさや植毛配列(実物大)


- 33 (S、M、H)



- 34 (S、M、H)



ハンドルカラー(各4色)

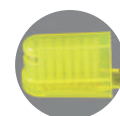

ハンドルカラーに合わせた専用キャップ付き。

狭い口腔内でもコントロールしやすい
超薄型コンパクトヘッド

DENT. MAXIMA



S(ソフト)

歯肉に炎症のある歯周病の初期治療時のプラークコントロールに。



MS(ミディアムソフト)

炎症のあまり強くない歯周病メンテナンス期のプラークコントロールに。



M(ミディアム)


歯肉の健康な方に。より確実なプラークコントロールのために。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

最後臼歯部までの確実なブラッシングのため、使いやすさを追求

- ① 頬側面や最後臼歯部に毛先が当てやすい
先端厚2.6mmの超薄型ヘッド。
植毛穴からヘッドの縁までわずか0.7mm。
口腔内で毛先を動かしやすい設計です。

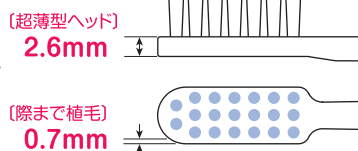

- ② 毛先が最後臼歯遠心面に届く、ロング&スリムネックを
採用。最後臼歯部へも無理なく楽に毛先が届きます。

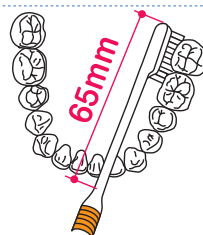

- ③ フィット感があり、滑りにくく持ちやすいハンドルです。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ヘッド側面写真 (実物大)



ハンドルカラー (各4色)



ステインが付着しやすい
歯間部のステインもオフ


Brilliant more 歯ブラシ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **350円**

ステインの付着しやすい歯間部も磨きやすい円錐状毛束

- 1つ1つの毛束が円錐状にカットされ、ステインの付着しやすい歯間部への優れた到達性と刷掃力を発揮します。
- 内側に3°傾斜したネックで、舌側・口蓋側のステインもオフ。
- 口腔内での操作性に優れたコンパクトヘッド、ペングリップに適したハンドル形状。
- 携帯に便利な歯ブラシキャップ付き。

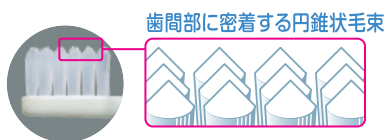

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



ヘッド側面写真(実物大)



ハンドルカラー(3色)



“カチッ”と音でお知らせ
オーバーブラッシングの改善をサポート

DENT.EX オーバーブラッシングケア



S(やわらかめ)



M(ふつう)




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

強すぎる力で歯や歯ぐきを傷めないために

- 1 みがかく力が強すぎる人も、力の入れ過ぎが音で分かり、適切なブラッシング圧に導きます。
- 2 先端厚2.6mmの超薄型ヘッドで、最後臼歯部まで無理なく楽に毛先が届き、歯垢を落とします。
- 3 ラウンド加工毛でプラークもしっかりケア。



●使用テストによるブラッシング圧測定結果(N=7 平均)

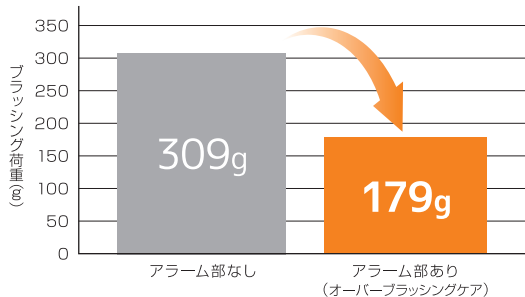


ヘッド部：オーバーブラッシングケアと同一 ※ライオン調べ



- 3 ラウンド加工毛でプラークもしっかりケア。

●歯垢除去力の比較

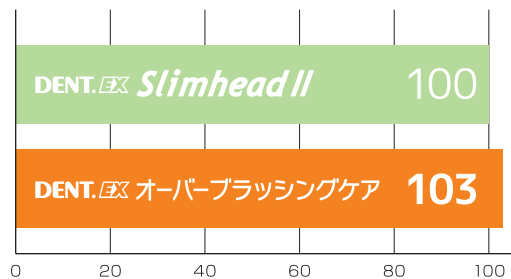

※DENT.EX Slimhead II 33Mを100とした場合の指数。モデル歯垢(プラーク)除去力評価(上顎第一大臼歯の全体) 荷重:200g ※ライオン調べ

ヘッドの大きさと植毛配列
(実物大)



ヘッド側面写真
(実物大)



ハンドルカラー
(各1色)



磨き残しがちな部位の 部分磨き用歯ブラシ

DENT. EX onetuft



Systema

長めのスーパーテーパード毛を活かして、歯周ポケットケアや（露出）根分岐部ケアに。




Systema Short

短めのスーパーテーパード毛により、目的部位への毛先コントロール性とかき取り力がアップ。



M

優れた刷掃力で目的部位をしっかりブラッシング。

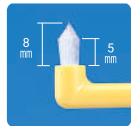

S

歯肉に接する部位に適した優しい磨き心地。



メーカー希望患者様向け価格／個（税抜） 330円

部位や症例に応じて使い分けられる4タイプ

1 患者様の状態に合わせて選べる4種類の植毛仕様をラインアップ。

●Systema

歯周ポケットなど、毛先の届きにくい奥まで。



歯周ポケット

●Systema Short


歯間部など、毛先の届きにくい細部や隙間。



狭い歯間部

●M


叢生部など、磨き残しがちな部位。

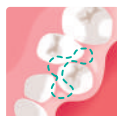

叢生部

●S

歯頸部など、デリケートな歯肉辺縁。

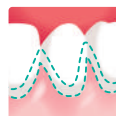

歯頸部

2 握りやすく、微妙な操作に対応できるラウンド状のハンドル。

3 内側に5°傾斜したネック形状。舌側のプラークコントロールがしやすい。

ヘッドの大きさと植毛配列（実物大）

●Systema



●Systema Short



●M



●S



ハンドルカラー（各3色）



術後からメンテナンスまで インプラント患者様のセルフケアに

DENT. EX ImplantCare



US(ウルトラソフト)
抜糸後のデリケートな歯肉、隣在歯のケアに。



ハンドルカラー（1色）



OT(ワンタフト)
ソフトで、毛先を狙った部位に当てやすい仕様。



ハンドルカラー（1色）



TR(Two Rows:二列)
歯頸部にしっかり毛先が入り込む二列植毛。




ハンドルカラー（1色）



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

インプラントの治療ステップに合わせて選べる3タイプ

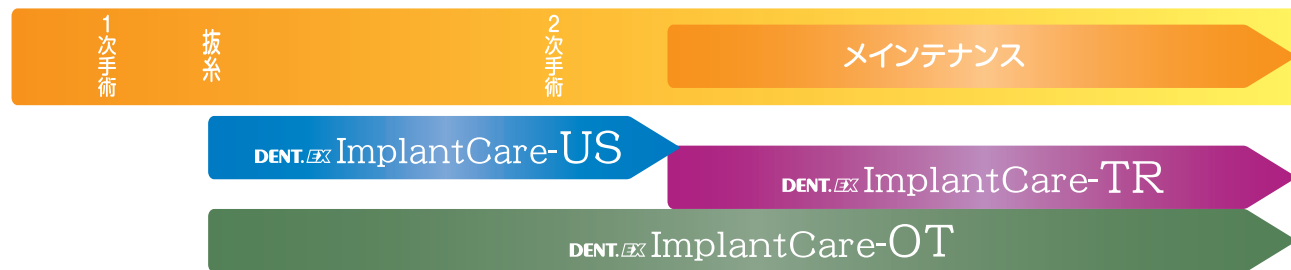

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

●US (ウルトラソフト)



●OT (ワンタフト)



●TR (Two Rows:二列)



監修 / 日本歯科大学 新潟病院 歯科衛生科 松岡恵理子さん

矯正治療中のプラークコントロールに

DENT. EX Orthodontic (オルソドンティック)



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

矯正中の部位、矯正の段階に応じて選べる4タイプ

- Orthodontic-R
屋根型の3列植毛。
矯正治療中のベーシックモデル。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-U
ワイヤー、ブラケットを
覆って磨く3列U字カット。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-T
ワイヤーを挟みこむように
清掃する2列植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-P
内側に15°傾斜したネック。
山型カットの小型ヘッド。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



お子様の歯列状態に合わせて 選べる子供用歯ブラシ

EX kodomo



11S、11M
混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)



12S、12M
混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)



13S、13M
乳幼児用 (適用年齢0~6歳)



14S、14M
仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)

お子様に人気のディズニーキャラクターたち と楽しい歯みがきタイム

EX kodomo Disney



11M / 混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&グーフィー)



12M / 混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&ドナルド)



13M / 乳幼児用 (適用年齢0~6歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&プルート)



14M / 仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&ミニニー)

©Disney 歯ブラシのハンドルについているキャラクターは全品種ミッキーマウスです。

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **270円**


メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **270円**

小さい頃から、歯みがき習慣が身につく子供用歯ブラシ

1 お子様の成長や歯列の状態に合わせて選べる4タイプ。

2 毛の硬さを目的に応じて選べます。

- ブラークをしっかり除去するための「M(ミディアム)」
- ブラッシングの習慣化のためにやさしい磨き心地の「S(ソフト)」※EX kodomoのみ
フラットテーパー毛を採用し、毛先の反発力が小さくソフトでやさしい磨き心地。
凹凸部分や歯と歯の間にまで毛先が届き、ブラークをしっかり除去します。

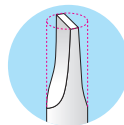

S(ソフト)
フラットテーパー毛

3 お子様のさまざまな握り方に対応するためのラウンドハンドル。



乳幼児のパームグリップ



小学生のパームグリップ



仕上げ磨きのペングリップ

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) EX kodomo DisneyはMタイプのみになります。

●11S、11M



ハンドルカラー (各4色)



●12S、12M



ハンドルカラー (各4色)



●13S、13M



ハンドルカラー (各4色)



●14S、14M



ハンドルカラー (各4色)



転倒時などのお口への負担を低減
まがる・おれない「安全ハンドル」の乳歯期用子供歯ブラシ

EX kodomo F



0~2才用
ブラッシングの習慣づけに




3~5才用
きちんと磨けて歯垢も落とせる

メーカー希望価格/個(税抜) 250円

毎日の歯みがきの安全性と磨きやすさを両立

1 転倒時などお口への負担を低減。まがる・おれない「安全ハンドル」。

■ 子供歯ブラシ 転倒時ネック変形最大荷重

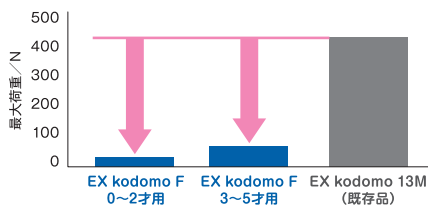

口腔内への
衝撃
約 90%
低減

● ライオン (株) データ
● 1才女児相当の身長・体重で転倒した場合に歯ブラシに加わる最大荷重を比較 (n=6)

2 子供による自分磨きでも、清掃力をしっかり確保 (3~5才用)。

3 しっかり握れるためのストレートハンドル。

4 毎日の歯みがきが楽しくなる
かわいい動物キャラクター。



ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

● 0~2才用



● 3~5才用



ハンドルカラー (各3色)



※ 青山ら:小児歯科学雑誌57 (3) :396-403 (2019).