

優れた
洗浄力
除菌力

使いやすい
顆粒タイプ

大容量
約70回分
顆粒 175g

原寸大




高機能性と使いやすさを追求した顆粒タイプの義歯洗浄剤

2024.10.21
改良新発売 エラック 義歯洗浄剤

優れた洗浄力・除菌力

活性酸素とアニオン界面活性剤の作用で、義歯に付着したステインやタバコヤニを除去します。また、真菌や細菌をしっかり除菌します。

優れた洗浄力

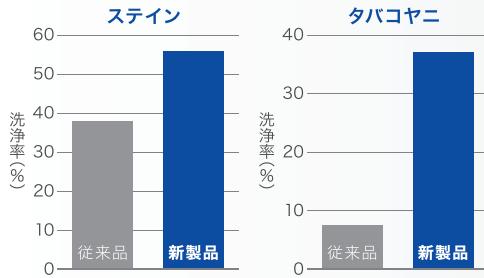

優れた除菌力



使いやすい顆粒タイプ

傾けるだけで1回分が出る計量キャップ付ボトル。



初めてお使いになると
は、計量キャップをはずし
赤い中栓を取り除き、
キャップをしっかりと取り付けてください。

高齢者にも持ちやすい大きなボトル。

錠剤のように、
個包装から取り出す手間が不要。
飲み込んでしまうリスクを低減。

清潔な義歯で快適な毎日を!


義歯清掃には義歯洗浄剤とブラッシングの併用が効果的です。
適切な義歯清掃習慣を身につけていただけるよう、
エラック義歯ケア製品を是非お役立てください。



▲
エラックの
詳しい情報は
こちらから

理想的な義歯清掃方法は、3ステップ洗浄


Step 1

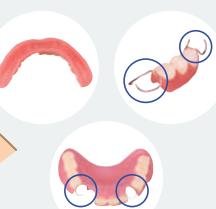

流水下で食べかすなどのおおまかな汚れを
洗い流してから、義歯ブラシで義歯を清掃
します。

①力の入れすぎ、研磨剤配合歯磨剤の使用は
禁物です。義歯を傷つける恐れがあります。

Step 2

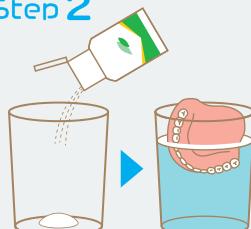

- ①コップに義歯洗浄剤1回分を入れます。
- ②水又はぬるま湯約150mlを加えて、してください。
義歯を浸します。
- ①義歯を傷める恐れがあるため、
熱湯は厳禁です。

Step 3



義歯を取り出し、流水下
でブラッシングします。
浮き上がった汚れと洗
浄剤をきれいに洗い
流します。

らくらく、やさしく、清潔に

清掃性を追求した義歯ブラシ

エラック 義歯ブラシ

らくらくスタイル



持ちやすく安定感のある
L字型ふくらハンドルと
操作しやすい広い指当て。

清掃性と義歯への
やさしさを両立した
適度な硬さの密毛ヘッド。

効率よく清掃できる
硬軟片面2ヘッド植毛。

メーカー希望小売価格／個：500円

義歯を使い始めたら、口腔粘膜のケアも忘れずに！

口腔粘膜ケア用ブラシ

エラック510 S(ソフト)
ES(エクストラソフト)



やわらかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。

大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。

メーカー希望小売価格／個：320円

介護用らくらくハブラシ、自分ミガキにも

エラック ハブラシ620 S(ソフト)
ES(エクストラソフト)



小さな開口でも入れやすい
薄型ヘッド・短い毛丈。

奥歯も磨きやすい
スリム＆カーブネック。

歯肉にやさしい
やわらかい植毛。

メーカー希望小売価格／個：250円

専門的ケアに適した仕上げ磨き用歯ブラシ

エラック541 S(ソフト) ES(エクストラソフト)
US(ウルトラソフト)



やわらかい植毛で、腫れや痛みがある方にもやさしくケア。

すみずみまでブラッシング
できる超コンパクトヘッド。

メーカー希望小売価格／個：320円

※価格には、消費税は含まれておりません。