


「使いやすさを追求した 義歯ブラシの新しいカタチ」

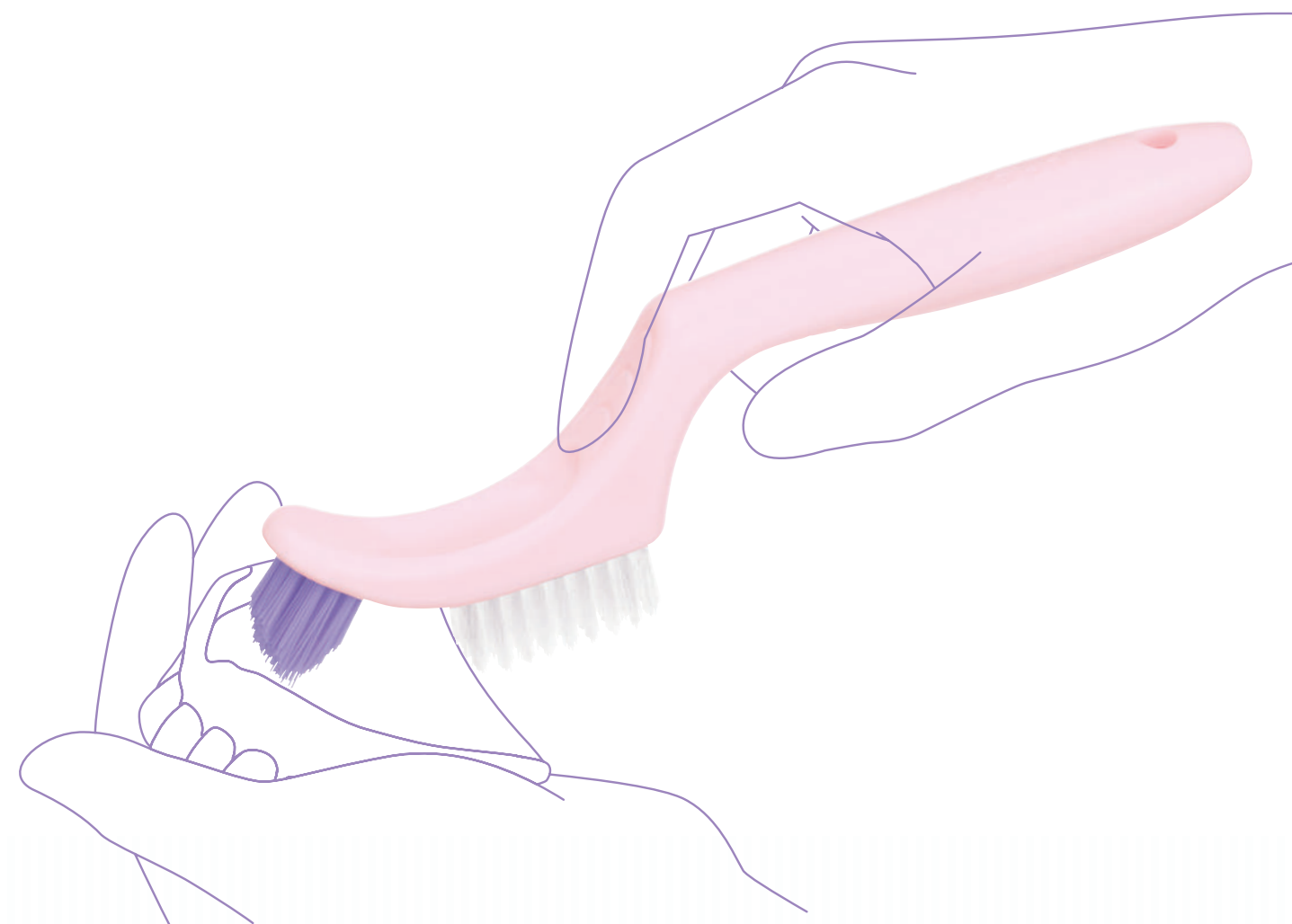

ERAC **エラック** 義歯ブラシ

らくらくスタイル

ERAC エラック 義歯ケア関連商品

清潔な義歯で快適な毎日をお過ごしいただくために、
義歯をお使いの患者様に是非ご推奨ください。

義
歯
の
ケ
ア
に

毎食後の義歯のブラッシングに

■エラック義歯ブラシらくらくスタイル



使用性、清掃性に優れた
使いやすさを追求した
義歯ブラシ。
らくらくブラッシングを
実現します。



しつこい汚れの洗浄や除菌に

■エラック義歯洗浄剤



3つのPoint

- 1 優れた洗浄力・除菌力。
- 2 傾けるだけで1回分が出る計量
キャップ付で、高齢者にも持ち
やすい大きなボトル。
- 3 錠剤のように個包装から取り
出す手間が不要。飲み込んでし
まうリスクも低減。

口
腔
内
の
ケ
ア
に

口腔内粘膜のケアに

■エラック510シリーズ



大きめヘッドと軟らかい
植毛で口腔粘膜のケア
に最適。

自浄作用が低下しやすい義歯
使用者の口腔粘膜のケアに。



■残存歯の少ない
患者様には、
歯ブラシとしても
お使いいただけます。

鉤歯など残存歯のケアに

■エラック541シリーズ



小さめヘッドとロング
ネックで細かい部分の
清掃に便利。

ブラークのたまりやすい鉤歯、
孤立歯や磁性アタッチメント
根板周囲の清掃に。



■歯肉にやさしい
軟らかめの植毛
です。

写真提供:愛知学院大学歯学部准教授 柳原保

仕
様



■ブルーグレー

■ピンク



内装箱に「ご使用のしおり
(義歯清掃のしおり)」を
6部添付しています。
患者様への義歯清掃指導
にご利用ください。

商品名	全長	刷毛	内装入数	メーカー希望 患者様向け価格/個
エラック義歯ブラシ らくらくスタイル	165mm	ナチュラル毛: 11mil パープル毛: 13mil *1mil=0.0254mm	6個 (2色×3)	500円



新しいカタチが「らくらくブラッシング」を実現

清潔な義歯で快適な毎日を過ごしていただきたい、
そんな思いから生まれたエラック義歯ブラシらくらくスタイル。
使いやすさの追求から生まれた3つの特長が、
患者様の毎日の義歯ケアをしっかりサポートします。
義歯ケアに欠かせないアイテムとして、是非患者様にお奨めください。


らくらくスタイル

point
1

効率良く清掃できる片面2ヘッド植毛

- 煩わしい持ち替えなしで2つのヘッドを使い分けることができ、効率よく清掃できます。

指の位置をスライドするだけでヘッドを使い分けできます

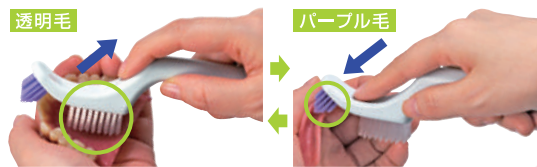


2つのヘッドの間に適切な距離と角度を取ることで、使用性の良い片面2ヘッドを可能にしました。

- 適度な硬さの密毛ヘッドなので、義歯にやさしく清掃力も抜群です。

義歯への負荷を抑えた硬すぎない用毛径でありながら、高密度に植毛することで、高い清掃性を実現しました。

透明毛は義歯全体に

パープル毛は細かいところに

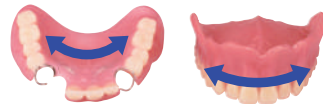

透明毛は、粘膜面や人工歯列など比較的凹凸の少ない部分の清掃に適しています。



パープル毛は、クラスプ等の金具周辺や顎堤に接する凹みなどの細かい部分の清掃に適しています。

point
2

使いやすく疲れにくいL字型ふっくらハンドル

- 片面2ヘッドだから実現したL字型ハンドルと、手のひらにぴったりフィットするふっくらハンドルで、持ちやすさ・使いやすさがアップしました。

L字型のふっくらハンドルが、軽い力でも安定感のある、手首への負担が少ないブラッシングを可能にしました。

- いくつかの持ち方からお好きな持ち方をお選びいただけます。握力の弱い方や、手首に負担を感じやすい方にも、無理なくブラッシングしていただける形状です。

リウマチなどで指が曲がりにくい方は、右図のように持つこともできます。



point
3

操作性の高い広い指当て

- 2つのヘッドのどちらを使う場合にも活用できる広い指当て付きなので、力加減や細かい動きの調節に大変便利です。
- 人差し指でも親指でも使える指当てなので、お好きな持ち方に対応できます。



透明毛を使う場合

指当ての浅い部分に指をおきます



パープル毛を使う場合

指当ての深い部分に指をおきます



効率的な
片面2ヘッド
植毛

便利な
広い指当て

持ちやすい
L字型ふっくら
ハンドル

便利な穴つき