



どの部位にも当てやすく、優れたプラーク除去効果を発揮

# Check-Up歯ブラシ










#### 歯ブラシ select MAP

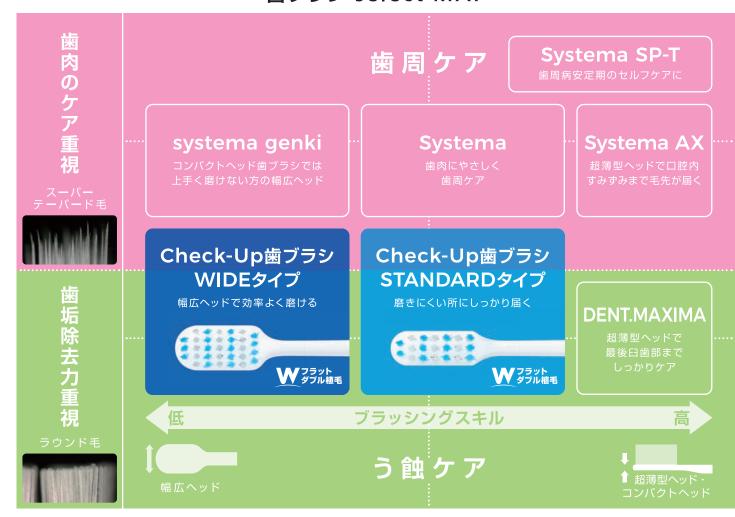



\*1 Check-Up歯ブラシは植毛部長さ約2cm

世仕様・入数・価格									
品名		Check-Up歯ブラシ STANDARDタイプ				Check-Up歯ブラシ WIDEタイプ			
種 類		S		M		S		M	
ヘッド部	大きさ・植毛配列(実物大)								
用毛	毛先	スーパー テーパード	ラウンド	スーパー テーパード	ラウンド	スーパー テーパード	ラウンド	スーパー テーパード	ラウンド
	長さ(mm)	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0
	太さ(mm)	0.17(根元)*3	0.18	0.18(根元)*3	0.20	0.17(根元)*3	0.18	0.18(根元)*3	0.20
 歯ブラシ全長(mm)		180				180			
カラー									
内装入数		12個(3色×4個)				12個(3色×4個)			
メーカー希望患者様向け価格/個		320円				360円			
商品写真		TrackUp ( ) DrackUp ( )				CheckUp (2) CheckU			

\*2 実測平均値 \*3 スーパーテーパード毛のため ※価格には、消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

ライオン歯科材 Q

株式会社モリタ

〒111-8644 東京都台東区蔵前 1-3-28 TEL.03(6739)9012 https://www.lion-dent.co.jp/



# Check-Up 歯ブラシ

## Check-Up歯ブラシが目指したものは

う蝕リスク部位の 高い清掃力と磨きやすさ ブラッシングテクニックに頼らずに 誰でも簡単に使いこなせること

今までは歯間部・咬合面など部位ごとに分けて、

各々に特化した用毛を選択、植毛した歯ブラシをご用意してまいりました。

Check-Up歯ブラシは発想を変え、

歯間部と咬合面の清掃に適した2種類の用毛を、フラットにダブルで植毛。

薄型ヘッドとゆるやかなカーブのスリムネックでどの部位にも当てやすく、

これ1本でリスク部位にしっかりとアプローチでき、優れたプラーク除去効果を発揮します。

#### こんな患者様におすすめです

歯間部の 磨き残しが多い方 歯間清掃用具との 併用が難しい方

子供用歯ブラシから 卒業するお子さまに

初めて歯科医院でTBIを受ける方に、 歯科医院で薦める「最初の1本」としてご活用下さい。



## STANDARDタイプ S·M

スリムな薄型ヘッドが歯面・咬合面、 歯間部・歯頸部、さらに臼歯部まで届き、 優れたプラーク除去効果を発揮します。





資料提供 静岡県沼津市 塚本歯科クリニック 鈴木亜紀 歯科衛生士



## Eheck-Up M

清掃力比較	歯間部 <i>の</i>	)モデル清掃力 n=5	咬合面のモデル清掃力 n=3	ヘッド+ネック樹脂部分の 体積比較	
Check-Up歯ブラシ STANDARDタイプ M	<b>129</b> ※ 歯間部の清掃力に優れる	1%	103 ** 同等の清掃カ 訓	<b>70.1</b> <sup>※</sup> コンパクト	
Slimhead II 33M (ラウンド毛歯ブラシ)	100%	意産	100%	100%	

顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。 荷重:200g 刷掃回数:10回 \*\*SlimheadII33Mを100とした場合の指数

## WIDEタイプ S・M

幅広ヘッドで、歯面から歯頸部・歯肉まで、 効率よくブラッシングが可能です。





資料提供 北海道札幌市 北24条かやの歯科クリニック 萱野美帆 歯科衛生士



Check-Up WS

ヘッド+ネック樹脂部分の 体積比較 清掃力比較 歯間部のモデル清掃力 n=5 咬合面のモデル清掃力 n=3 215% 204% Check-Up歯ブラシ WIDEタイプ S 歯間部の清掃力に優れる 咬合面の清掃力に優れる 有意差 DENT.EX 100% 100% 100% systema genki f (ス<del>ー</del>パーテーパード毛歯ブラシ)

顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。 荷重:300g 刷掃回数:20回 ※DENT.EX systema genki fを100とした場合の指数

ラウンド毛とスーパーテーパード毛のダブル植毛が 歯面・咬合面、歯間部・歯頸部、さらに臼歯部まで届き、 優れたプラーク除去効果を発揮します。

#### ラウンド毛

毛先を丸めたラウンド加工毛は、しっかりした ブラッシングが可能です。歯面や咬合面のプラーク 除去に効果的です。

#### 歯面・咬合面 〇 歯間 🛆







#### スーパーテーパード毛

先端部0.01mmの先端極細毛は、歯肉へのストレスが 少なく、やさしい磨き心地です。狭い歯間部や歯頸部 にも毛先が到達します。

歯面・咬合面 △ 歯間 ○







## フラット ダブル植毛

## あらゆる部位に毛先が届き、優れたプラーク除去効果


毛束の間隔を少し空け、毛先面を揃え「フラット」に植毛することで、それぞれの 毛束が動きやすく、歯間部や歯頸部に入り込みやすくなります。



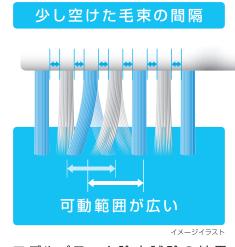

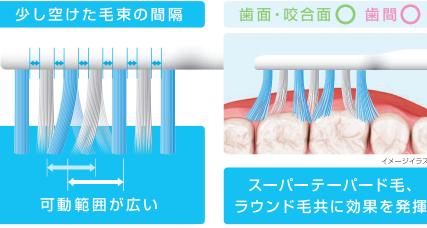


モデルプラーク除去試験の結果

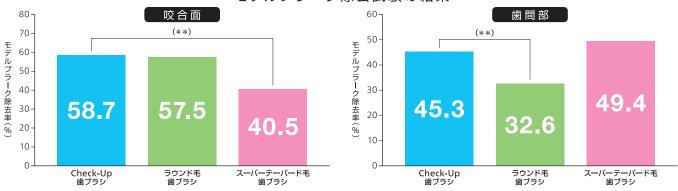

#### Tukey-Kramer 検定: (\*\*)p<0.01、n=5 ラウンド毛歯ブラシ・スーパーテーパード毛歯ブラシ: Check-Up歯ブラシSTANDARDタイプのハンドルにそれぞれの毛のみを植えた歯ブラシ

## 優れた操作性

薄型ヘッド+スリムネックで臼歯部まで届きやすく、 滑りにくいラバーハンドルで使いやすい。

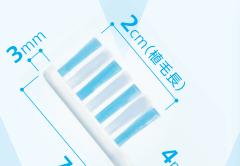

## 薄型ヘッド+スリムネックの高い到達性

ヘッド部3mm・ネック部4mmの厚さ、ヘッド部+ネック部を75mmの 長さにすることで、臼歯部にも届きやすい高い操作性を実現しました。



臼歯部(7・8番)にアクセスしやすい



スリムロングネック

## 植毛長=約2cmの理由



フッ化物配合歯磨剤の 15歳以上の使用量の目 安(=2cm)を簡単に測 ることができます。

### 選べる2つの毛の硬さ

お口の状況や、お好みの使用感に合わせて2つの タイプをお選びいただけます。



やわらかめで 優しい磨き心地



しっかりプラークを かきとる。磨き残し が多い方に。



## 持ちやすく 滑りにくい ラバーハンドル

ペングリップでもパーム グリップでも持ちやすく、 高い操作性を発揮します。