

効果的なブラッシング指導は、適切な歯ブラシ選びから。

LION Toothbrush select guide

ライオン歯ブラシ セレクトガイド

Systema

Systema AX

systema SP-T 歯ブラシ

DENT. EX systema genki

Check-Up 歯ブラシ

DENT. MAXIMA



スペック・価格表

品名	Systema				Systema AX			Systema SP-T 歯ブラシ	DENT. EX systema genki シリーズ			Check-Up 歯ブラシ		DENT. MAXIMA		
	42M	42H	44M	44H	44M	44H	45M	—	genki	genki f	genki j	standardタイプ		S	MS	M
種類												S	M			
ハシ 下部	大きさ・植毛例 (実物大)															
	長さ (mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	20.5	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1	23.4	21.1		
	幅 (mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	8.8	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2	9.1	7.5		
先端厚み (mm)	4.5				2.6			4.5	4.5		4	3.0	2.6			
毛先	スーパーテーパード											スーパーテーパード ラウンド	ラウンド			
用毛	長さ (mm) ※1	12				10.3			9	12		9.5	10.5			
	根元太さ (mm) ※2	0.19				0.18			0.15	0.19		0.15	0.17	0.18		
	長さ (mm)												10.0		9	
	太さ (mm)												0.18	0.2	0.15	0.18
歯ブラシ全長 (mm)	165	164.6	170		180			170	190		180	180		185		
カラー																
内装入数 (個)	20				12			12	12			12		12		
メーカー希望 患者様向け 価格/個	300円				400円			400円	400円			320円		380円		
商品写真																

※1 実測平均値 ※2 スーパーテーパード毛のため ※価格には、消費税は含まれておりません

患者様一人ひとりの効果的なTBIに。

乳幼児から高齢者に至るまで、患者様の歯や口腔の状態、症状はさまざま。また、ブラッシングスキルやケア意識、生活習慣も異なります。本ガイドでは患者様に最適な1本をお選びいただく指針として、主要製品をピックアップしてご紹介いたします。患者様への効果的なTBIにお役立てください。

●用毛



スーパーテーパード毛

先端部0.01mmの先端極細毛は、歯肉へのストレスが少なく、やさしい磨き心地です。狭い歯間部や歯周ポケットにも毛先が到達します。




ラウンド毛

毛先を丸めたラウンド加工毛は、歯肉を傷めにくく、しっかりしたブラッシングが可能です。咬合面や歯面のプラーク除去に効果的です。

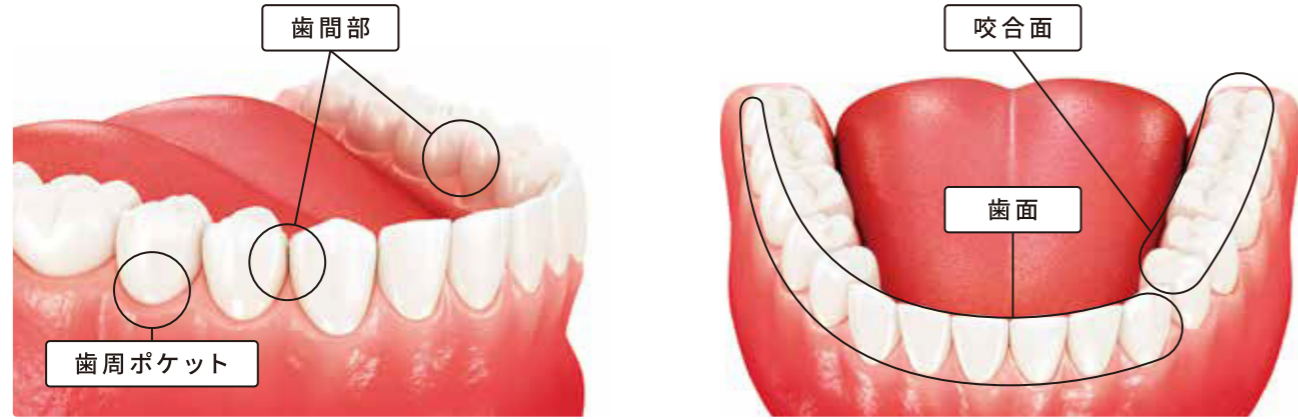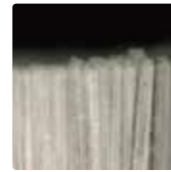

フラットダブル植毛 (スーパーテーパード毛 + ラウンド毛)

2種類の用毛を交互に植毛することで、歯面・咬合面から歯間部まで毛先が届きます。また、毛先面がフラットなのでどの部位にも当てやすく、高いプラーク除去効果を発揮します。

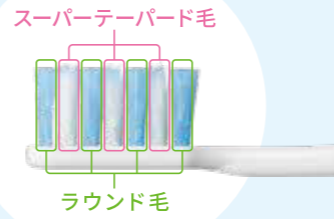

●ヘッド

幅広ヘッド

ヘッド部の横幅を広くした効率重視の設計。歯面から歯頸部・歯肉まで効率よくブラッシングが可能です。



超薄型・薄型ヘッド

ヘッド部の厚さを極力減らした設計。狭い口腔内のすみずみまで一歯ずつ丁寧にブラッシングが可能です。



新提案

歯ブラシ select MAP

患者様に合った歯ブラシをお選びください

スーパーテーパード毛

歯肉のケア重視

Systema genki

コンパクトヘッド歯ブラシでは上手く磨けない方の幅広ヘッド

genki genki f genki j

Systema

歯肉にやさしく歯周ケア

44M

Systema SP-T

歯周病安定期のセルフケアに

Systema AX

超薄型ヘッドで口腔内すみずみまで毛先が届く

44M 45M

幅広ヘッド ↓ ↑ 歯面から歯肉まで効率よく磨きたい

← ブラッシングスキル →

↑ ↓ 超薄型ヘッド 白歯部まで一歯ずつ丁寧に磨きたい

ラウンド毛

歯垢除去力重視

Check-Up 歯ブラシ

フラットダブル植毛でプラークにダブルアプローチ TBIのファーストステップに

DENT. MAXIMA

超薄型ヘッドで最後白歯部までしっかりケア

スーパーテーパード毛

ラウンド毛

う蝕ケア



歯周ケア スーパーテーパード毛 幅広ヘッド

コンパクトヘッド歯ブラシでは 上手く磨けない方の幅広ヘッド。

歯面から歯頸部・歯肉まで、効率よく安定したブラッシングが可能。
スーパーテーパード毛が、歯間や歯周ポケットまで到達します。



植毛列

6 5 4

太めの曲面ハンドル
ペン、パームなどさまざまな握り方に対応。

接触面積が広く、広範囲を効率的にブラッシング



歯周ケア スーパーテーパード毛




歯周ケア スーパーテーパード毛



歯周病安定期のセルフケアに 歯肉にやさしい磨き心地でじっくりケア。

細くしなやかな用毛長9mmのスーパーテーパード毛を密に植毛しました。歯周ポケットや歯間部の狭いすき間にも優れた刷掃力を発揮します。

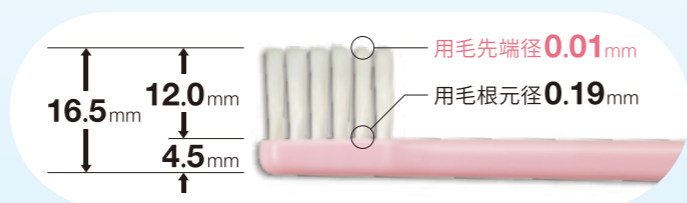


スーパーテーパード毛 先端径

0.01mm

用毛長

9.0mm

歯頸部、歯間部への毛先到達比較

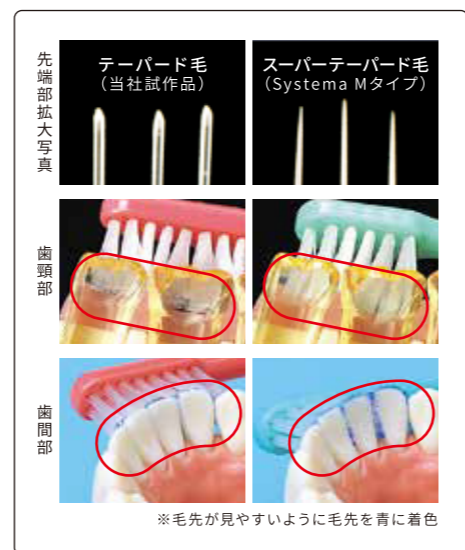

刷掃力強化タイプ


Systema 42H・44H

植毛数を増やすことで、
刷掃力を高めた歯ブラシ。

優れた到達性・刷掃性

歯頸部、歯間部に毛先が確実に到達。

歯肉へのストレス

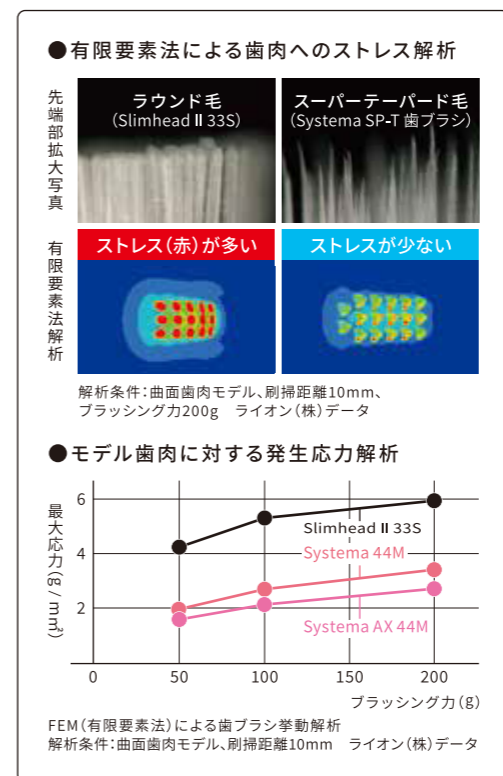

やさしい磨き心地

歯肉にやさしく、しっかりブラッシング。

歯周ケア スーパーテーパード毛 超薄型ヘッド



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で 口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く。


先端厚2.6mmの超薄型ヘッド、ロング&スリムネックで、最後臼歯部まで無理なくらくらくに毛先が届きます。




ヘッド部 先端厚

2.6mm

ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較

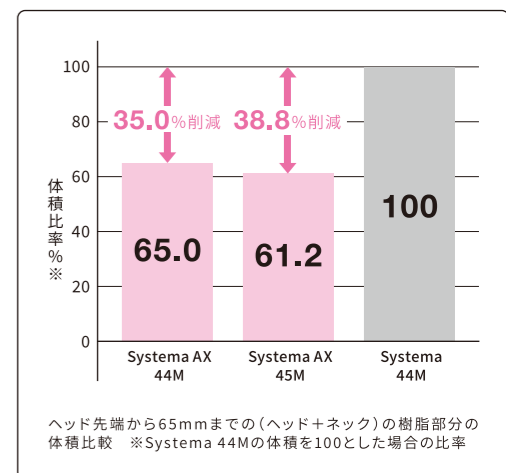

ソフトラバー付き曲面グリップ
なめらかな曲面ですべりにくく、さまざまな握り方に対応。

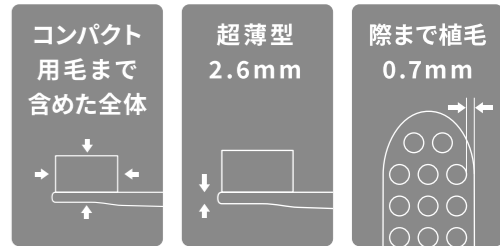

超薄型ヘッド+ ロング&スリムネック

口腔内に入る体積が少なく、最後臼歯部の狭い部位でもすみずみまで到達。



う蝕ケア & 歯周ケア

スーパーテーパード毛 + ラウンド毛

薄型ヘッド

デント マキシマ

う蝕ケア


ラウンド毛

超薄型ヘッド



「フラットダブル植毛」で プラークにダブルアプローチ。

スーパーテーパード毛とラウンド毛のフラットダブル植毛と薄型ヘッドが、歯間部・咬合面・臼歯部まで届き、高いプラーク除去効果を発揮します。う蝕ケアから歯周ケアまで、TBIのファーストステップにおすすめです。

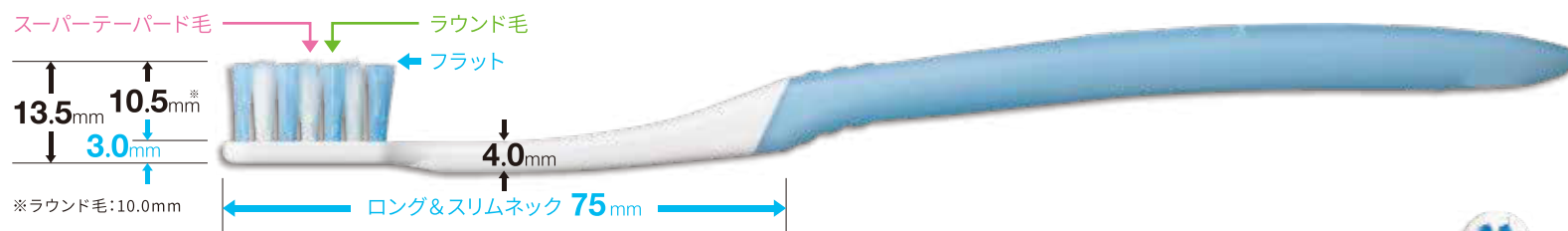


植毛長=約2cmの理由

フッ化物配合歯磨剤の15歳以上の使用量の目安(=2cm)を簡単に測ることができます。



フラットダブル植毛

清掃力比較

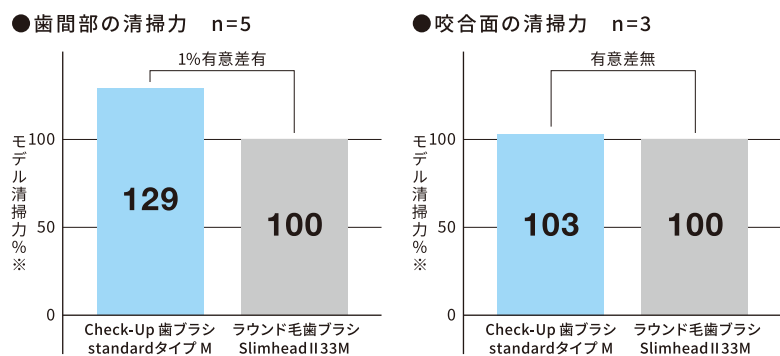

●歯間部の清掃力 n=5
1%有意差有
モデル清掃力%※
129 (Check-Up) vs 100 (Slimhead)

●咬合面の清掃力 n=3
有意差無
モデル清掃力%※
103 (Check-Up) vs 100 (Slimhead)

●清掃力試験




顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:200g 刷掃回数:10回 ※Slimhead II 33Mを100とした場合の指数

フラットダブル植毛の高い清掃力

毛先面がフラットなのでどの部位にも当てやすく、ダブル植毛が、歯間部と咬合面のプラークをしっかりと除去します。

体積比較

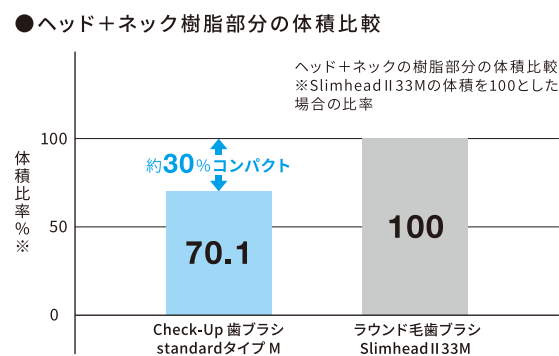

●ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較
ヘッド+ネックの樹脂部分の体積比較
※Slimhead II 33Mの体積を100とした場合の比率
約30%コンパクト
70.1 (Check-Up) vs 100 (Slimhead)



ヘッド・ネックの総体積が少ないため、臼歯部(7番・8番)にアクセスできる



薄型ヘッドとロング&スリムネックの高い到達性 臼歯部にも無理なく届きます。

持ちやすくすべりにくいラバーハンドル
ペングリップでもパームグリップでも持ちやすく、高い操作性を發揮。



イメージイラスト

スーパーテーパード毛
歯間部に入りやすい

ラウンド毛
歯間部に入りにくい

フラットダブル植毛
(スーパーテーパード毛 + ラウンド毛)
少し空けた毛束の間隔

毛束の間隔を少し空ける事で、毛束が動きやすく歯間部や歯頸部に入り込みます。スーパーテーパード毛だけでなくラウンド毛も効果を發揮します。

ラウンド毛も
歯間部に入りやすい


超薄型ヘッド+ロング&スリムネックで、 最後臼歯部までしっかりケア。

先端厚2.6mmの超薄型ヘッド、ロング&スリムネック。臼歯部に磨き残しが多い方におすすめです。



超薄型 ヘッド

最後臼歯部まで無理なくらくに
毛先が届く。

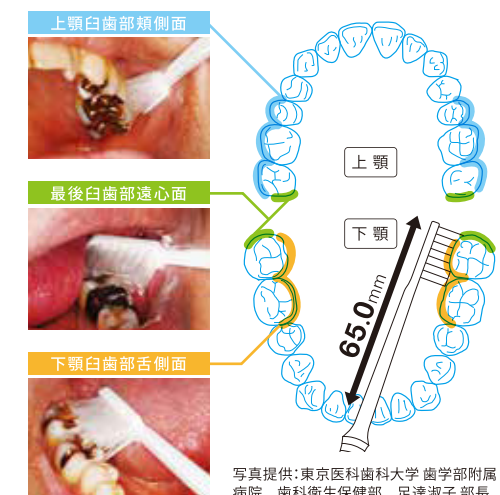

写真提供:東京医科歯科大学 歯学部附属
病院 歯科衛生保健部 足達淑子部長

弾カラバークリップ

フィット感があって、すべりにくく持ちやすい。

最後臼歯部のう蝕リスクに

超薄型ヘッド+ロング&スリムネックで
無理なくらくに毛先が届く