

必要なの?



フロスを併用すると...



歯ブラシだけの
場合より、
プラーク除去率が

約**1.5倍**

〈歯間部のプラーク除去率〉

歯ブラシのみ **58%**



歯ブラシ+デンタルフロス **86%**



引用文献：山本他、日本歯周病学会誌、17：258,1975.

歯間清掃用具

DENT. EX ウルトラフロス

豊富なカラー
バリエーション



ホルダーカラーは、
S・Mともに気分で作る各5色。



S
狭い歯間用
(細めタイプ)



S3

3本入
黄緑
オレンジ
ピンク
(各1本)



S10

10本入
ペパーミント
黄緑
黄
オレンジ
ピンク (各2本)



M
一般歯間用
(普通タイプ)



M3

3本入
水色
紺紫
(各1本)



M10

10本入
白色
青紺
紫 (各2本)

DENT. EX ウルトラフロス リーフレット

歯科用

お子さまにも
カンタン!
歯間ケア



DENT. EX ULTRA FLOSS ウルトラフロス

の使い方



なぜ

フロスが



歯間のプラークにご用心



歯間のプラークは
ムシ歯や歯周病の原因。
歯ブラシだけでは
落とせません。



だから
フロスで
歯間ケア!

ライオン歯科材株式会社

2016.02.S0-02

LION

※保護者の管理のもとで使用してください。

歯間ケアなるほどカンタン講座! DENT.EXウルトラフロス



どんな
特長があるの?



使い方の
ポイントは?

特長

1

プラークをしっかり落とす

たるみを持たせた束状の繊維がプラークをからめ取ります。



特長

2

使いやすいY字型ホルダー




奥歯も
手軽に清掃
できます。

特長

3

歯間に挿入しやすい

せまい歯間にも
スムーズに
入り込みます。

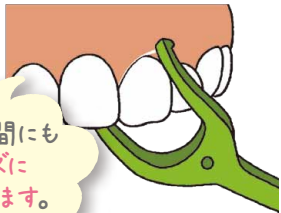

特長

4

切れにくく、くり返し使える



丈夫な繊維
テクミロン™採用。
水で流して
くり返し使えます。

STEP


1



狭くてフロスが通りにくいところは、横にゆっくりスライドさせながら挿入しましょう。
※強い力でまっすぐに挿入しようとすると、歯ぐきを傷つけることがあります。

STEP


2

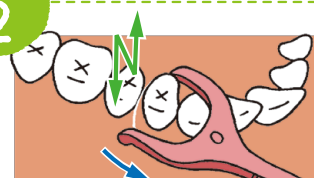

隣り合った歯を1歯ずつ、まず手前の歯面に沿わせながら上下に動かし、プラークをこすり取ります。

STEP

3

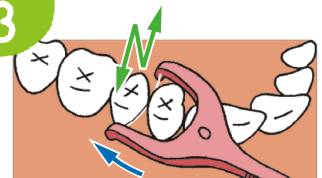

次に反対側の奥の歯面に沿わせながら上下に動かし、プラークをこすり取ります。
※必ず歯間の両歯面を清掃しましょう。

STEP

4



歯と歯ぐきの境目にある溝(歯肉溝)の中のプラークを、歯ぐきを傷つけないようにこすり取ります。

※鏡を見ながら歯ぐきを傷つけないように行いましょう。

※保護者の管理のもとで使用してください。

